

A12T Dilutus 80 %

Lievästi denaturoitu etanoliliuos

100 ml, 500 ml, 1 L, 5 L, 10 L



Tuotekuvaus

Kirkas ja lähes tuoksuton lievästi denaturoitu etanoliliuos, joka haihtuu nopeasti. A12t Dilutus 80% desinfiointiliuos soveltuu terveydenhuollon ei-invasiivisten välineiden ja laitteiden desinfiointiin sekä ihon desinfektioon ennen injektion antoa, näytteenottoa tai muuta invasiivista toimenpidettä. Käytetään sellaisenaan ihon preoperatiiviseen desinfektioon. Tuotteen pH on n. 7,0.

Ei soveltuvat käyttökohteet:

- Ei limakalvoille
- Ei materiaaleille, jotka eivät siedä alkoholia

Materiaali

Säilyy 5 vuotta suljettuna ja 2 vuotta avaamisen jälkeen. Säilytettävä pystyasennossa huoneenlämmössä. Pakkauksen ja valmisteen yhteensopivuus on laatuvarmennettu.

Annostelu

Käytetään puhtaalle, kuivalle pinnalle tai iholle. Käytetään sellaisenaan ihon preoperatiiviseen desinfektioon sekä ennen invasiivisia toimenpiteitä sairaalakohtaisten ohjeiden mukaisesti. Alkoholin desinfektioaika on sen kuivumisaika. Ei-invasiiviset välineet ja laitteet desinfioidaan riittävällä määrällä liuosta ja annetaan kuivua valmistajan ohjeiden mukaan.

Koostumus

Ethanol (denat.) 80 w-% / 85 vol-% , Aqua

EN-testit

Bakteerit

EN 1500 Hygieeninen käsidesinfektio (faasi 2/vaihe 2)

EN 12791 Kirurginen käsidesinfektio (faasi 2/vaihe 2)



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

EN-testit

EN 13727 Kvantitatiivinen suspensiotesti bakterisidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)

EN 14561 Kvantitatiivinen carrier-testi bakterisidisen tehon osoittamiseksi instrumenttien desinfektioon terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)

Homeet ja hiivat

EN 13624 Kvantitatiivinen suspensiotesti fungisidisen ja yestisidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)

EN 13697 Kvantitatiivinen pintatesti ei-huokoisille materiaaleille bakterisidisen ja/tai fungisidisen tehon osoittamiseksi ilman mekaanista hankausta (faasi 2/vaihe 2)

EN 14562 Kvantitatiivinen carrier-testi fungisidisen tai yestisidisen tehon osoittamiseksi instrumenttien desinfektioon terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)

Virukset

EN 14476 Kvantitatiivinen suspensiotesti virusidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/1)

Varastointi ja säilyvyys

Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta ja kuumilta pinnoilta. Ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa. Säilytä tiiviisti suljettuna. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Lisätietoa turvallisesta käytöstä käyttöturvallisuustiedotteessa.

Valmistusmaa

Suomi

Valmistaja

Berner Oy

Kierrätysohjeet

Muoviset pakkausmateriaalit ovat kierrätyskelpoisia ja poltettavia. Muovinkeräykseen muovipakkaus soveltuu huuhdeltuna, pullo ja suljin eroteltuina. Pakkauskartonki lajitellaan kartonkikeräykseen.

Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
100 ml	13221122	16 kpl	3360 kpl	6414504294737	6414504689984
500 ml	13221124	12 pl	840 pl	6414500007065	6414504716581
1 L	13221126	12 pl	360 pl	6414500007058	6414504941846
5 L	13221132	3 kan	108 kan	6414504139847	6414504774833
10 L	13221142	1 kan	40 kan	6414500007157	6414504778855



100 ml



500 ml



1 L



5 L



10 L



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se