

Desinfektol P

Etanolipohjainen pintadesinfektioaine

100 ml, 500 ml, 500 ml pumppupullo, 5 L



Tuotekuvaus

Desinfektol P on etanolipohjainen tehokas desinfektioaine lääkinällisten laitteiden ja tarvikkeiden, terveydenhuollon hoitoympäristöjen pintojen sekä ihon desinfektioon ennen pieniä lääketieteellisiä toimenpiteitä. Tuotteen pH on n. 7,0. Tuote on luokan IIa lääkinällinen laite.

Käyttökohteet

Desinfektol P on mikrobisidisesti tehokas desinfektioaine, joka tuhoaa bakteerit, hiivat, homeet ja useimmat virukset. Tuotteen pH on neutraali eikä se sisällä hajusteita tai väriaineita. Desinfektol P sopii sellaisenaan alkoholeja kestävien materiaalien desinfektioon kaikkialla terveydenhuollossa, hammashuollossa ja hoivakodeissa. Sillä voidaan desinfioida mm. verenpainemittarit, mansetit, stetoskoopit kalvopäineen, kuumemittarit sekä ei-invasiiviset välineet valmistajan ohjeen mukaan. Tuote ei sovellu käytettäväksi yhdessä saippuan tai anionisen pinta-aktiivisen aineen kanssa. Tuote ei sovellu etanolia tai bentsalkoniumkloridia kestäättömille pinnoille.

Ei soveltuvat käyttökohteet:

- Ei ennen preoperatiivista toimenpidettä
- Ei saa käyttää instrumenttien kemialliseen desinfektioon liottamalla
- Ei kosteille pinnoille
- Ei sovellu käsien desinfiointiaineeksi

Annostelu

Käytetään esipuhdistetuille ja kuiville pinnoille. Kaada Desinfektol P:tä käsiteltävälle pinnalle tai kostuta kertakäyttöinen pyyhe kosteaksi Desinfektol P:llä. Pyyhi desinfiointi väline, pinta tai iho huolellisesti. Varmista, että pinta on kauttaaltaan märkä. Huomioi pyyhkeen riittävä kosteus. Jos pyyhe tuntuu kuivalta, etanoli on haihtunut eikä tehoa.

Jos ainetta joutuu silmiin, huuhto vedellä usean minuutin ajan. Lisätietoja löytyy käyttöturvallisuustiedotteesta.



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

Koostumus

Etanoli (denat. 70 p-% / 76,9 t-%), Aqua ad100 %, Alkyylidimetyyliibentsyylammoniumkloridi

EN-testit

Bakteerit

- EN 12791 Kirurginen käsidesinfektio (faasi 2/vaihe 2)
- EN 13727 Kvantitatiivinen suspensiotesti bakterisidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)
- EN 14561 Kvantitatiivinen carrier-testi bakterisidisen tehon osoittamiseksi instrumenttien desinfektioon terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)

Homeet ja hiivat

- EN 13624 Kvantitatiivinen suspensiotesti fungisidisen ja yestisidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)
- EN 13697 Kvantitatiivinen pintatesti ei-huokoisille materiaaleille bakterisidisen ja/tai fungisidisen tehon osoittamiseksi ilman mekaanista hankausta (faasi 2/vaihe 2)
- EN 14562 Kvantitatiivinen carrier-testi fungisidisen tai yestisidisen tehon osoittamiseksi instrumenttien desinfektioon terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)

Virukset

- EN 14476 Kvantitatiivinen suspensiotesti virusidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)

Varastointi ja säilyvyys

Säilyy 5 vuotta suljettuna ja 2 vuotta avaamisen jälkeen. Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Myrkyllistä vesieliöille.

Säilytä pakkaus tiiviisti suljettuna ja suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta ja muilta sytytyslähteiltä.

Valmistusmaa

Suomi

Valmistaja

Berner Oy

Kierrätysohjeet

Pakkaukset ovat PE-HD muovia ja 100ml pullo PET-muovia. Muoviset pakkausmateriaalit ovat kierrätyskelpoisia ja poltettavia. Muovinkeräykseen muovipakkaus soveltuu huuhteltuna, pullo ja suljin eroteltuina. Myös pumppu metalliosineen soveltuu muovinkeräykseen. Pakkauskartonki lajitellaan kartonkikeräykseen. Pakkauksen ja valmisteen yhteensopivuus on laatuvarmennettu.

Pakkaustiedot



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
100 ml	13240125	16 pl	3360 pl	6414504596213	6414504664479
500 ml korkilla	13240124	12 pl	840 pl	6414500006891	16414500006898
500 ml pumpulla	13240123	10 pl	640 pl	6414504251037	6414504718790
5 L	13240132	3 kan	108 kan	6414504139762	6414505156287



100 ml



500 ml korkilla



500 ml pumpulla



5 L



Berner Oy
 Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
 +358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
 Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
 + 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se