

Desiol

Pesevä etanolipohjainen desinfektioaine pinnoille ja välineille

500 ml, 5 L



Tuotekuvaus

Desiol on pesevä etanolipohjainen desinfektioaine lääketieteellisten ei-invasiivisten instrumenttien ja välineiden sekä terveydenhuollon hoitoympäristöjen pintojen puhdistukseen ja desinfektioon.

Desiol on mikrobisidisesti tehokas desinfektioaine, joka tuhoaa bakteerit, hiivat, homeet ja virukset. Poikkeuksen muodostavat bakteeri-itiöt, joihin etanolituotteet eivät tehoa. Pesevien tensidijohdannaisten ansiosta Desiol kestää orgaanista räsytystä ja tunkeutuu lian läpi. Tuotteen pH on n. 7,0 (neutraali), eikä se sisällä hajusteita, väriaineita tai klooriyhdisteitä. Desiolia voidaan käyttää kaikille alkoholeja kestäville materiaaleille, myös useimmille muoveille lukuun ottamatta akryylimuovia (PMMA). Laitteiden kohdalla on noudatettava laitevalmistajan ohjeita laitteen puhdistukseen. Lasi- ja metallipinnoille suosittelemme Desinfektol P -desinfektioainetta.

Ei soveltuvat käyttökohteet

- Ei saa käyttää pinnoille ja välineille, jotka eivät siedä alkoholeja
- Ei saa käyttää instrumenttien kemialliseen desinfektioon liottamalla
- Ei kosteille ja kuumille pinnoille

Materiaali

Pakkauksesta pullo ja kanisteri ovat HD-PE- ja sulkimet PP-muovia. Pakkauksen ja valmisteen yhteensopivuus on laatuvarmennettu.

Annostelu

Käytetään kuiville pinnoille. Kaada Desiolia käsiteltävälle pinnalle tai kostuta kertakäyttöinen pyyhe Desiolilla. Käsittele desinfioitava väline tai pinta huolellisesti. Varmista, että ainetta on koko pinnalla. Odota, että etanoli on haihtunut ennen pinnan tai välineen käyttöönottoa.

Koostumus

Ethanol (denat. 75 w-% / 81,3 % v-%), N-alkyl-aminopropylglycine, Non-ionic surfactants < 5 %, Aqua

EN-testit



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

EN-testit

Bakteerit

- EN 13727 Kvantitatiivinen suspensiotesti, bakterisidinen teho (faasi 2/1)
- EN 14348 Kvantitatiivinen suspensiotesti, mykobakterisidinen teho (faasi 2/1)
- EN 14561 Kvantitatiivinen kantajatesti, bakterisidinen teho (faasi 2/2)
- EN 14563 Kvantitatiivinen kantajatesti, mykobakteridisinen ja tuberkulosidinen teho (faasi 2/2)

Homeet ja hiivat

- EN 13624 Kvantitatiivinen suspensiotesti, fungisidinen ja jestisidinen teho (faasi 2/1)
- EN 13697 Ei-huokoisten pintojen testi elintarvike- ja muilla teollisuuden aloilla, kotitalouksissa sekä laitoksissa käytettävälle desinfektioaineille. Bakterisidinen, fungisidinen ja jestisidinen teho (faasi 2/ 2)
- EN 14562 Kvantitatiivinen kantajatesti, fungisidinen ja jestisidinen teho (faasi 2/2)
- EN 16615 Kvantitatiivinen kantajatesti, bakterisidinen ja jestisidinen teho pyyhittäessä (faasi 2/2)

Virukset

- EN 14476:2013 + A1:2015 Kvantitatiivinen suspensiotesti, virusidinen teho (norovirus)

Varastointi ja säilyvyys

Säilyy huoneenlämmössä 5 vuotta suljettuna ja 2 vuotta avaamisen jälkeen. Säilytettävä tiiviisti suljettuna ja pystyasennossa. Suojattava lämmöltä, kipinöiltä ja avotulelta. Tupakointi kielletty Desiolin välittömässä läheisyydessä. Jos kemikaalia joutuu silmiin, huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Lisää tuotteen turvallisesta käytöstä käyttöturvallisuustiedotteesta.

Valmistusmaa

Suomi

Valmistaja

Berner Oy

Kierrätysohjeet

Muoviset pakkausmateriaalit ovat kierrätyskelpoisia ja poltettavia. Muovinkeräykseen muovipakkaus soveltuu huuhdeltuna, kanisteri/pullo ja suljin eroteltuina. Pakkauskartonki lajitellaan kartonkikeräykseen. Pienet määrät Desiolia voi huuhdella viemäriin runsaan veden kera ja suuremmat määrät toimitetaan erikseen jätteidenkäsittelylaitokselle.

Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
500 ml	13240624	12 pl	840 pl	6414504160285	6414504234351
5 litraa	13240632	3 kan	108 kan	6414504180962	6414504234412



500 ml



5 litraa



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se