



ProWipes etanoli pesevä desinfektiopyyhe

Desinfektiopyyhe soveltuu ei-invasiivisten
lääkinnällisten laitteiden desinfektioon
terveydenhuolto- ja hoitoympäristössä. Ei
sterilointiin, ei ihon desinfektioon



Tuotekuvaus

Bea Pron etanolipohjainen pesevä ProWipes desinfektiopyyhe soveltuu ei-invasiivisten lääkinällisten laitteiden desinfektioon terveydenhuolto- ja hoitoympäristössä. Ei sterilointiin, ei ihon desinfektioon. Vaikuttavina aineina 75% alkoholi (70% etanoli, 5% isopropanolia) sekä pesevänä ainesosana alkyylipolyglukosidi C8-10. Laadukas kansimekanismi takaa, että pakkaus on helposti avattavissa ja suljettavissa uudestaan. Tuotteen pH on 5-7. Pyyhkeen koko on 300 x 200 mm.

Materiaali

Pyyhkeiden materiaali on 50 g non-woven polyesteri. Pakkaukset ovat PET/PE-muovia.

Annostelu

Käytä pesevää etanoli desinfektiopyyhettä alkoholia kestävien pintojen puhdistamiseen ja desinfiointiin. Noudata desinfioitavan välineen tai kohteen valmistajan ohjetta soveltuvista desinfektioaineista. Tarkista, että pakkauksen säilyvyysaika on voimassa. Desinfioi kädet ja pue suojakäsineet. Ota pyyhe ja sulje pakkaus huolellisesti. Pyyhi pinta niin, että se kastuu kauttaaltaan. Erittäin likaisiin pintoihin saatetaan tarvita useampia pyyhkeitä. Noudata annettua desinfektioaikaa. Hävitä pyyhe ja pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti. HUOM! Merkitse pakkaukseen päivä, jolloin pakkaus on avattu ensimmäisen kerran.

Koostumus

Etanoli 70 %

Isopropanoli 5 %

Alkyylipolyglukosidi C8-10

EN-testit

Bakteerit

- EN 13727 Kvantitatiivinen suspensiotesti bakteereja tappavan tehon määrittämiseksi terveydenhuollossa (2/1)
- EN 16615 Kvantitatiivinen terveydenhuollon pyyhintätesti bakteereja ja hiivoja tappavan tehon määrittämiseksi terveydenhuollossa (2/2)

Hiivat ja sienet



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

EN-testit

- EN 13624 Kvantitatiivinen suspensiotesti hiivoja tappavan tehon määrittämiseksi terveydenhuollossa (2/1)
- EN 16615 Kvantitatiivinen terveydenhuollon pyyhintätesti bakteereja ja hiivoja tappavan tehon määrittämiseksi terveydenhuollossa (2/2)

Virukset

- EN 14476 +A1 Kvantitatiivinen suspensiotesti virusidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (2/1)

Mykobakteerit

- EN 14348 Kvantitatiivinen suspensiotesti mykobakteereja tappavan tehon määrittämiseksi (2/1)

Pakkausmerkinnät



Varastointi ja säilyvyys

Säilyvyys avaamattomana 2 vuotta valmistuksesta ja yhden (1) kuukauden avaamisen jälkeen. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa.

Valmistusmaa

Yhdistynyt kuningaskunta

Jakelija

Berner Oy

Kierrätysohjeet

Pakkaukset ja pyyhkeet ovat kierrätettäviä. Sekä pyyhkeet että pakkaukset voidaan hävittää energiajätteenä.

Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
25 kpl	15770154	20 pkt	1000 pkt	6414504964913	5025254060810

