



Prowipes yleispuhdistuspyyhe

Prowipes yleispuhdistuspyyhe



Tuotekuvaus

Käyttövalmis puhdistuspyyhe kaikille vettä kestäville pinnoille. Ei sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, alkoholia eikä desinfektioaineita. Jättää siistin pyyhintä-jäljen. Pyyhe soveltuu 1 m² alueen puhdistamiseen. Laadukas kansimekanismi takaa, että pakkaus on helposti avattavissa ja suljettavissa uudestaan. Pyyhkeen koko on 300 x 200 mm.

Käyttöohje

Noudata puhdistettavan välineen tai kohteen valmistajan ohjetta soveltuvista puhdistusaineista. Tarkista, että pakkauksen säilyvyysaika on voimassa. Desinfioi kädet ja pue suojakäsineet. Ota pyyhe ja sulje pakkaus huolellisesti. Pyyhi pinta ja anna kuivua. Laita käytetty pyyhe suoraan jätteisiin. Riisu suojakäsineet ja desinfioi kädet. HUOM! Merkitse pakkaukseen tuotteen avaamispäivä.

Materiaali

Pakkaukset ja pyyhkeet ovat kierrätettäviä. Pyyhkeiden materiaali on 60 g non-woven polyesteri. Pakkaukset ovat PET/PE-muovia. Pyyhkeet ja pakkaukset voidaan hävittää energijätteenä.

Koostumus

< 5% Ionittomia tensidejä
amfoteerisiä tensidejä
Fenoksietanoli
Etyyliheksyyli glyseriini
Säilöntäaine: Potassium Sorbate, pH n. 5,2

Varastointi ja säilyvyys

Säilyvyys avaamattomana 30 kuukautta valmistuksesta ja 3 kuukautta avaamisen jälkeen. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa.

Valmistusmaa

Suomi



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

Valmistaja

Berner Oy

Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
24 kpl	15912086	21 pkt	504 pkt	6414505201130	



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se