

## PREVANTICS 2% CHG

3 ml, 10,5 ml, 26 ml



### Tuotekuvaus

Kertakäyttöinen Prevantics 2 % CHG- levitin sisältää 2 % (w/w) klooriheksidiiniglukonaattia ja 70 % (v/v) isopropyylialkoholia, joka on käyttövalmis ihon desinfiointiliuos. Levitin on käyttövalmis steriili laite, jolla on laaja bakteereja tappava vaikutus. Se on helppo aktivoida käyttökuntoon. Prevantics on tarkoitettu ihmisten hygieniakäyttöön; käytetään iholle tai ihokosketukseen ensisijaisena tarkoituksena ihon desinfiointi. Valmisteen teho on osoitettu terveydenhuollossa bakteereja-, hiivoja- ja viruksia vastaan.

**Käyttöohjeet:** Aktivoi asetin painamalla säiliön yläosaa. Älä koske sieneen. Odota muutama sekunti ja kastele sitten sieni painamalla ja vapauttamalla sieni ihoa vasten, kunnes neste on näkyvässä. Levitä tuotetta desinfioitavalle alueelle voimakkein edestakaisin ja ylös-alas liikkein, toistaen vähintään 30 sekunnin ajan, ja anna ihon kuivua. Laaja-alainen vaahtosieni mahdollistaa hellävaraisen hankaavan levityksen, mikä parantaa käyttäjämukavuutta.

#### Ei soveltuvat käyttökohteet:

- Ototoksinen
- Ei keskosille
- Ei klooriheksidiinille yliherkille
- Ei sovellu käytettäväksi lähellä silmiä tai limakalvoja
- Ei ihon avonaisiin haavoihin
- Ei suoraan hermokudokseen (aivo – tai selkäydinkudos).

### Materiaali

Pakkausmateriaali: PAP 22 (kartonki), muovi

### Sterilointimenetelmä

Neste on suodatettu ja sen jälkeen levitin on steriloitu etyleenioksidilla (ETO).

### Annostelu

Varmista, että oikea levitin on valittu oikealle ihoalueelle alla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

- 3 ml levittimellä voidaan desinfioida 15 x 15 cm ihoalue
- 10,5 ml levittimellä voidaan desinfioida 30 x 30 cm ihoalue



## Annostelu

- 26 ml levittimellä voidaan desinfioida 50 x 50 cm ihoalue

## Koostumus

Propan-2-ol (CAS 67-63-0): 62g/100g

Chlorhexidine Gluconate (CAS 18472-51-0): 2g/100g

Glycerine (CAS-nro: 56-81-5)

## EN-testit

### Bakteerit

- EN 12791 Kirurginen käsidesinfektio (faasi 2/vaihe 2)
- EN 13727 Kvantitatiivinen suspensiotesti bakterisidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)

### Homeet ja hiivat

- EN 13624 Kvantitatiivinen suspensiotesti fungisidisen ja yestisidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)

### Virukset

- EN 14476 Kvantitatiivinen suspensiotesti virusidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)

## Varastointi ja säilyvyys

Säilyvyysaika on 2 vuotta valmistuspäivämäärästä. Pidä poissa lämmönlähteistä ja avotulesta.

## Valmistusmaa

Italia

## Jakelija

Berner Oy

## Kierrätysohjeet

Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

## Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
3 ml	IAP4200A	11 kpl	1320 kpl	5056012302071	
10,5 ml	IAP4220A	10 kpl	1200 kpl		
26 ml	IAP4230A	10 kpl	1200 kpl	5056012302095	





3 ml

10,5 ml

26 ml



Berner Oy  
Hitsajankatu 24, 00810 Helsinki  
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical  
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna  
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se